

INDICAÇÃO DE USO

O ChicagoTip é um dispositivo descartável de sucção auto-limpante para ser usado em uma série de cirurgias. Com estilete embutido, fornece uma solução simples para remover qualquer entupimento sem retirar a ponta de sucção da mangueira.

Utilizado para aspirar fluidos residuais fisiológicos, tais como sangue, muco, fluidos gástricos ou outros tipos de secreções, liberados após ou durante procedimentos cirúrgicos.

MODO DE USO DO CHICAGOTIP:

Examinar o produto antes da utilização.


- 1-Remova o dispositivo da embalagem com procedimentos assépticos.
- 2-Remova o estilete de resgate puxando a alça preta saindo da extremidade distal do ChicagoTip.
- 3- Empurre o controle deslizante para a frente e para trás testando os componentes e os movimentos.
- 4- Retraia o controle deslizante para a porção proximal.
- 5-Após finalizado o teste, conecte o ChicagoTip a uma tubulação de sucção de ¼ de polegada ou 6,35 milímetros sobre a barbeta na extremidade proximal do dispositivo para início do procedimento.
- 6-Coloque o polegar sobre o orifício da manopla para controle do vácuo.




(Posição inicial do botão e estilete para início do uso do produto)

- 7-Ligue o vácuo ajustando a pressão para aplicar a pressão de vácuo mínima necessária para executar o procedimento.
- 8-A taxa de fluxo pode ser reduzida diminuindo a força sobre a saída no orifício da manopla.
- 9-Se ocorrer obstrução da ponta, avance o controle deslizante, empurrando o estilete para a frente, para remover a obstrução.

1

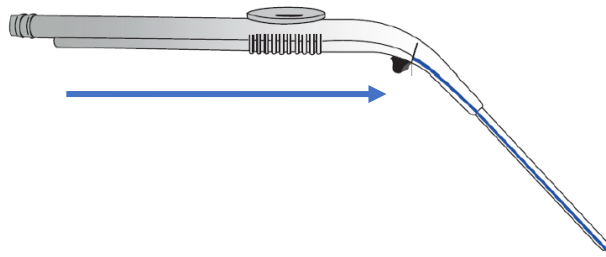

Se a obstrução permanece, retraia o controle deslizante, desconecte o tubo de sucção, insira o estilete de resgate na extremidade proximal da alça e avance-o para a ponta. **10-A** sucção ativa pode ser retomada retraindo o estilete, nos casos de obstruções padrões que não requeiram a desconexão do ChicagoTip. Do contrário, reconecte-o ao tubo de sucção.

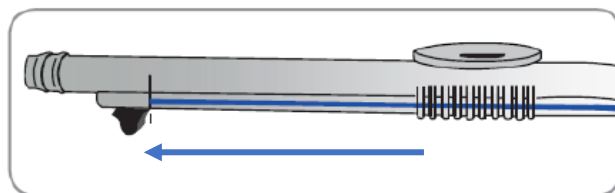

- 11-Quando o procedimento for finalizado, retire cuidadosamente o ChicagoTip e desligue o vácuo.
- 12-Descarte o ChicagoTip de acordo com os regulamentos aplicáveis a resíduos hospitalares contaminantes.

*O procedimento de coleta de resíduos do paciente envolve o uso de outros produtos médicos, os quais serão comercializados separadamente.

** É utilizado juntamente com outros produtos médicos, tais como: tubo de sucção, bomba de aspiração e o frasco coletor, os quais são comercializados separadamente.

DIMENSÕES:

Código	Descrição	Dimensão (diâmetro x comprimento)
CT209	ChicagoTip	3mm x 127mm
CT210	ChicagoTip	3.3mm x 127 mm
CT212	ChicagoTip	4mm x 127mm

2

* Os modelos diferenciam-se somente em seus dados dimensionais, possuindo mesma composição, indicação e modo de uso.

ADVERTÊNCIAS:

- O produto somente pode ser manipulado por profissional especializado;
- O conteúdo é fornecido esterilizado por Raios Gama. Não utilize se o selo de esterilização estiver danificado;
- Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;
- Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos;
- Não reutilize, reprocesse nem reesterilize. A ponta de sucção é estéril e descartável e deve ser utilizada uma única vez. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou provocar a sua falha, o que, por sua vez, pode causar lesões ou doenças, contaminação do dispositivo e/ou o risco de infecção no paciente ou infecção cruzada, incluindo, mas não se limitando, a transmissão de doença (s) contagiosa (s) de um paciente para outro;
- Recomenda-se empregar as precauções universais de segurança durante o manuseio do dispositivo.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Armazenar e transportar em local fresco, seco e limpo, distante de poeira, umidade e luz e à temperatura ambiente.

PRAZO DE VALIDADE:

- 03 anos após a data de esterilização.

3

FABRICANTE RESPONSÁVEL / UNIDADE FABRIL:

Fabricante Responsável:

NEUROENTERPRISES LLC;
15 Riverwalk CT, Port Barrington, Illinois, 60010, Estados Unidos da América.

Unidade Fabril:

CATHETER RESEARCH, Inc.;
6102, Victory May, Indianapolis, Indiana, 46278, Estados Unidos da América.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP

Alameda Terracota, 185, Conj. 504 e 505.

CEP: 09531-190 – São Caetano do Sul – São Paulo

CNPJ: 11.820.103/0001-14

Responsável Técnica: Marina de Assis Lima

CRBM/SP: 24931

Registro ANVISA n°: 81236270002

sac@x-safe.med.br



**NEURO
ENTERPRISES**
DESIGNS BY SURGEONS FOR SURGEONS

INSTRUÇÃO DE USO CHICAGO TIP®

